


Cologuard®와 함께 대장암 검사를 준비해보세요

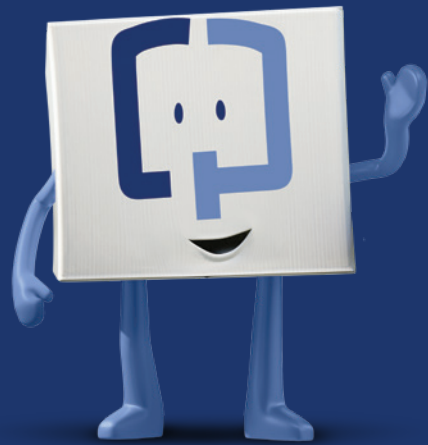

대장암 검사를 통해 자신을 돌봅니다

가장 예방 가능한 형태의 암입니다¹

45~49세 성인 발병률이 증
가하고 있습니다²

조기에 발견하면 90%의 경우 치
료 가능성이 더 높습니다^{3*}

그렇기 때문에 적시 검진은 정기적 건
강 검진의 일부가 되어야 합니다




Cologuard는 평균적인 대장암 위험이 있는 45세 이상 성인을
검사하기 위한 것입니다. Rx 전용.

책자 뒷면에 나와 있는 중요한 위험 정보를 참조하세요.

*5년 생존 기준.

Cologuard는 초기 단계에서도 대장암을 찾아냅니다^{4,5}

Cologuard는 비침습적 검사 옵션입니다.
준비할 필요가 없으며 집에서 개인 정보를
보호할 수 있습니다.

 Cologuard의 대장암 발견율은
92%에 달합니다⁴

 Cologuard는 1 및 2기 암
발견율은 94%에 달합니다⁵

45~49세 성인에서의 Cologuard 성능은 50세
이상 환자의 대규모 임상시험을 기반으로 추정된
것입니다. 이 임상시험에서 암이 없는 사람 중
13%가 양성 결과(위양성)를 받았고 암이 있는
사람 중 8%가 음성 결과(위음성)를 받았습니다.

책자 뒷면에 나와 있는 중요한 위험 정보를 참조하세요.

보험이 있는 환자 대부분은 \$0를 지불합니다*

Cologuard는 Medicare를 비롯한 대부
분의 주요 보험회사에서 보장합니다

전국적으로 Cologuard 환자의 94%
이상이 개인 부담 비용을 지출하지
않습니다.*

*Exact Sciences는 2019년 10월 1일부터 2020년 1
월 31일까지를 기준으로 이전 환자 청구 내역에 기반하여
추산합니다. 보장 요율은 주/지역마다 다릅니다. 보장 예외
조건이 적용될 수 있습니다. Cologuard의 보장 방식은
보험사에서만 확인할 수 있습니다.

보험 적용 범위에 대해

더 알고 싶으십니까?


[Cologuard.com/insurance](https://cologuard.com/insurance)로 이동



이 알림 메모를 떼어내어 Cologuard 키트를 반환을 잊지 않도록

평소 알림 메모를 붙이는 장소(예: 욕실 또는 냉장고)에 붙이십시오.

 늦어도 다음 날짜까지 키트를
반환하십시오.

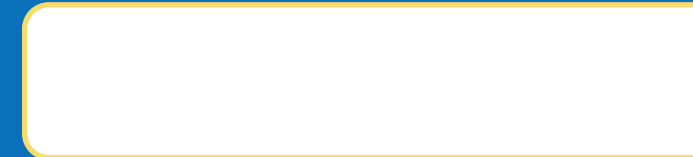

Cologuard.com/use

사용하기 간편합니다!

사용 방법(How to Use) 등
영상을 보시려면 스마트폰
카메라를 사용하여 QR 코
드 위에 장치를 대십시오.

Cologuard 채취 키트를 잊지 말고 반환하십시오!

Cologuard 키트 사용 방법



- 1 키트를 받으면 포장을 풀고 동봉된 환자 안내서를 확인합니다.
- 2 표본 용기를 번기 받침대에 놓습니다.
- 3 Cologuard 키트를 사용해 표본을 채취합니다.
- 4 표본을 긁어낸 다음 표본 용기에 방부제를 넣습니다. 라벨 2장을 모두 작성하십시오.
- 5 선불 UPS 라벨을 사용하여 채취 후 24시간 이내에 상자를 Exact Sciences Laboratories로 반송합니다. 1-844-870-8870으로 전화하여 비접촉 UPS 픽업을 예약하거나 Cologuard.com/UPS를 방문하십시오. 키트를 반환하라는 유용한 안내 전화를 받을 수도 있습니다.

연중무휴 지원 이용 가능

1-844-870-8870으로 전화하거나
웹 사이트를 방문하여 당사와 채팅을 이
용하세요 Cologuard.com

키트 내용물은 무엇이 있나요?



배송 박스



튜브



액상 방부제



표본 용기



환자 안내서



키트 반환 방법



받침대



표본 라벨

지시 사항 및 중요한 위험 정보

Cologuard는 대변에서 특정 DNA 마커와 혈액을 검출하여 평균적인 대장암의 위험을 가지고 있는 45세 이상의 성인을 검사하기 위한 것입니다. 선종이 있거나 염증성 장질환 및 특정 유전성 증후군이 있거나 대장암에 대한 개인 병력 또는 가족력이 있는 경우 사용하지 말아야 합니다. Cologuard는 고위험 환자의 대장 내시경 검사를 대신하지 않습니다. 45~49세 성인에서의 Cologuard 성능은 50세 이상 환자의 대규모 임상시험을 기반으로 추정된 것입니다.

Cologuard 검사 결과는 주의해서 해석해야 합니다. 양성 검사 결과가 암이 있다는 것을 확정하는 것은 아닙니다. 양성 검사 결과가 나온 환자는 대장 내시경 검사 진단을 받아야 합니다. 음성 검사 결과가 암이 없다는 것을 확정하는 것은 아닙니다. 음성 검사 결과가 나온 환자는 언제 다시 검사를 받아야 하는지 의사와 상의해야 합니다. 위양성 및 위음성 결과가 나타날 수 있습니다. 임상시험에서 암이 없는 사람 중 13%가 양성 결과(위양성)를 받았고 암이 있는 사람 중 8%가 음성 결과(위음성)를 받았습니다. Rx 전용.

참고 문헌:

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227.
2. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(4):250-281.
3. National Cancer Institute. SEER cancer stat facts: colorectal cancer. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/correct.html>. Accessed February 4, 2020.
4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297.
5. Ahlquist DA. Multi-target stool DNA test: a new high bar for noninvasive screening. *Dig Dis Sci.* 2015;60(3):623-633.

EXACT
SCIENCES

 **cologuard**
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard는 Exact Sciences Corporation의 등록 상표입니다.
©2020 Exact Sciences Corporation. 당사가 모든 권리를 보유합니다. US.CG.2859-2-July 2020.