


## Detectar el cáncer de colon con Cologuard®

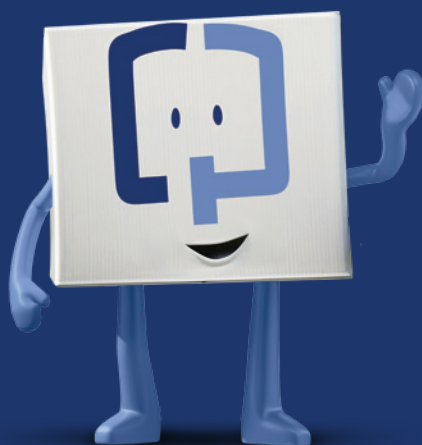

Cologuard está diseñado para usarse como prueba de detección en adultos mayores de 45 años con riesgo promedio de padecer cáncer colorrectal. Solo con receta.

Consulte la información importante sobre los riesgos en la parte de atrás del folleto.

## Cuidarse haciendo una prueba de detección de cáncer colorrectal

Es la forma de cáncer que se puede prevenir más.<sup>1</sup>

Aumenta en personas de 45 a 49 años.<sup>2</sup>

Cuando se detecta en las etapas iniciales, es más tratable en un 90% de las personas.<sup>3\*</sup>

Por eso, hacer oportunamente las pruebas de detección debe ser parte de sus chequeos médicos.

\*Basado en una supervivencia de 5 años.

## Cologuard detecta el cáncer de colon incluso en las etapas iniciales.<sup>4,5</sup>

Cologuard es una opción de detección no invasiva. No necesita preparación y puede hacer la prueba de detección en la privacidad de su casa.



Cologuard detecta un **92%** de los casos de cáncer en general.<sup>4</sup>



Cologuard detecta un **94%** de los casos de cáncer en las etapas I y II.<sup>5</sup>

El rendimiento de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima sobre la base de un amplio estudio clínico de pacientes mayores de 50 años. En un estudio clínico, el 13% de las personas sin cáncer recibió un resultado positivo (falso positivo) y el 8% de las personas con cáncer recibió un resultado negativo (falso negativo).

Consulte la información importante sobre los riesgos en la parte de atrás.

## La mayoría de los pacientes asegurados paga \$0\*

Cologuard está cubierto por Medicare y la mayoría de las aseguradoras más importantes.

A nivel nacional, más del 94% de los pacientes que usan Cologuard no tienen que pagar costos de bolsillo por la prueba de detección.\*

\*Cálculo de Exact Sciences con base en la facturación histórica del paciente del 1 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020. La tasa de cobertura varía por estado y región. Podrían aplicarse algunas excepciones; solo su aseguradora puede confirmar en qué casos Cologuard estaría cubierto.

### ¿Necesita más información

sobre la cobertura de seguros? Visite [Cologuard.com/insurance](https://cologuard.com/insurance)

**Arranque este recordatorio para ayudarlo a devolver su kit de Cologuard** y póngalo en un lugar donde generalmente deja recordatorios, como su baño o el refrigerador.



**Devuelva su equipo a más tardar:**



[Cologuard.com/use](https://Cologuard.com/use)

**¡Soy fácil de usar!**  
Usando la cámara de su teléfono inteligente, pase el cursor por encima del código QR para ver el video de Cómo Usar.

¡No olvide devolver su kit de recolección Cologuard!

## Cómo **usar** su kit Cologuard



- 1 Una vez que reciba su kit, desempáquelo y revise la Guía para Pacientes adjunta.
- 2 Coloque el recipiente para la muestra en el soporte del inodoro.
- 3 Use su kit Cologuard para recolectar su muestra.
- 4 Raspe su muestra y luego agregue el conservante en el recipiente de la muestra. Además, asegúrese de completar ambas etiquetas.
- 5 Usando la etiqueta de prepago de UPS, envíe la caja a Exact Sciences Laboratories dentro de las 24 horas de su recolección. Programe una recolección de UPS sin contacto llamándonos al 1-844-870-8870 o visitando [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS). Y puede que reciba útiles llamadas de recordatorio para que devuelva su kit.

### Soporte disponible 24/7

Llame al **1-844-870-8870** o comuníquese con nosotros visitando [Cologuard.com](https://Cologuard.com)

## ¿Qué hay **adentro** del kit?



Caja de envío



Tubo



Conservante líquido



Recipiente para la muestra



Guía para el paciente



Cómo devolver su kit



Soporte



Etiquetas para la muestra

## Indicaciones e información importante sobre riesgos

Cologuard se usa para examinar a adultos mayores de 45 años, con un riesgo promedio de cáncer colorrectal, mediante la detección de ciertos marcadores de ADN y sangre en las heces. No lo use si tuvo adenomas, tiene enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios, o antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal. Cologuard no es un reemplazo de la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. El rendimiento de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima sobre la base de un amplio estudio clínico de pacientes mayores de 50 años.

Los resultados de la prueba Cologuard deben interpretarse con precaución. Un resultado positivo no confirma que haya cáncer. Los pacientes con un resultado positivo en la prueba deben remitirse para que se hagan una colonoscopia de diagnóstico. Un resultado negativo no confirma que no haya cáncer. Los pacientes con un resultado negativo en la prueba deben hablar con su médico sobre cuándo deben volver a hacerse la prueba. Pueden ocurrir falsos positivos y falsos negativos. En un estudio clínico, el 13% de las personas sin cáncer recibió un resultado positivo (falso positivo) y el 8% de las personas con cáncer recibió un resultado negativo (falso negativo). Solo con receta.

### REFERENCIAS:

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests (Mayores avances en las pruebas de detección de cáncer en heces). *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227.
2. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society (Pruebas de detección de cáncer colorrectal para adultos con riesgo promedio: actualización de la directriz de 2018 de la Sociedad Americana Contra el Cáncer). *CA Cancer J Clin.* 2018;68(4):250-281.
3. Instituto Nacional del Cáncer. Información estadística de SEER sobre el cáncer: cáncer colorrectal. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/correct.html>. Acceso: 4 de febrero de 2020.
4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening (Pruebas de ADN en heces con objetivos múltiples para la detección de cáncer colorrectal). *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297.
5. Ahlquist DA. Multi-target stool DNA test: a new high bar for noninvasive screening (Pruebas de ADN en heces con objetivos múltiples: nuevo estándar alto para las pruebas de detección no invasivas). *Dig Dis Sci.* 2015;60(3):623-633.

**EXACT SCIENCES**

**cologuard**  
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719  
[ExactSciences.com](https://ExactSciences.com) | [ExactLabs.com](https://ExactLabs.com) | 1-844-870-8870

Cologuard es una marca registrada de Exact Sciences Corporation.  
©2020 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados. US.CG.2859-2 de julio de 2020.