


Cologuard®와 함께 대장암 검사를 준비해보세요

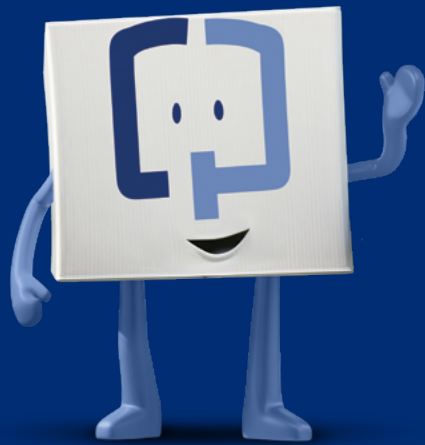

Cologuard는 평균적인 대장암 위험이 있는 45세 이상 성인을
검사하기 위한 것입니다. Rx 전용.

책자 뒷면에 나와 있는 중요한 위험 정보를 참조하세요.

대장암 선별검사를 통해 자신을 돌봅니다

대장암은 가장 예방 가능한
암으로 여겨지지만, 가장 예방이
되지 않는 형태의 암입니다¹

50세 미만 성인 발병률
이 증가하고 있습니다²


조기에 발견하면 90%의 경우 치
료 가능성이 더 높습니다^{3*}

그렇기 때문에 적시 검진은 정기적 건
강 검진의 일부가 되어야 합니다

*5년 생존 기준.

Cologuard는 초기 단계에서도 대장암을 찾아냅니다^{4,5}

Cologuard는 비침습적 선별검사 옵션으로
사적으로 집에서 할 수 있습니다. 준비와 휴
식도 필요 없으며 식이나 약물을 바꿀 필요
도 없습니다.

 Cologuard의 대장암 발견율은
92%에 달합니다⁴

 Cologuard는 1 및 2기 암
발견율은 94%에 달합니다⁵

45~49세 성인에서의 Cologuard 성능은 50세
이상 환자의 대규모 임상시험을 기반으로 추정된
것입니다. 이 임상시험에서 암이 없는 사람 중
13%가 양성 결과(위양성)를 받았고 암이 있는
사람 중 8%가 음성 결과(위음성)를 받았습니다.

책자 뒷면에 나와 있는 중요한 위험 정보를 참조하세요.

보험이 있는 환자 대부분은 \$0를 지불합니다*

Cologuard는 Medicare를 비롯한 대부분
의 주요 보험회사에서 보장됩니다

전국적으로 Cologuard 환자의 94% 이상
이 선별검사에 대한 본인부담금을 지출하지
않습니다.*

Exact Sciences는 2021년 6월 30일을 기준으로 이전
환자 청구 내역에 기반하여 추산합니다. 보장 요율은
주/지역마다 다릅니다. 보장 예외 조건이 적용될 수 있습니다.
Cologuard의 보장 방식은 보험사에서만 확인할 수 있습니다.

보험에 대해

자세히 알아보려면 다음 사이트를
방문하세요

[Cologuard.com/insurance](https://cologuard.com/insurance)

당사의 전문 팀에서는 보험사에 정확한 문의를 할 수 있도록
도와드립니다.


다음 번호로 연락해주시요. **1-844-870-8870**



**이 알림 메모를 떼어
내서 Cologuard 키트를
반환할 수 있도록 하고**
평소에 메모를 붙이는 장소(예: 욕실 또는
냉장고)에 이 알림 메모를 붙이십시오.



늦어도 다음 날짜까지 키트를
반환하십시오.

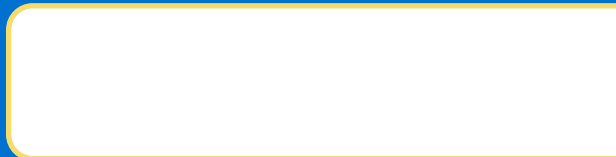

사용하기
간편합니다!

Cologuard.com/use

사용 방법(How to Use) 동영상을 보시려면 스마트폰
카메라를 사용하여 QR 코드 위에 장치를 대십시오.

Cologuard 채취 키트를 잊지 말고 반환하십시오!

Cologuard 키트 사용 방법



- 1 키트를 받으면 포장을 풀고 동봉된 환자 안내서를 확인합니다.
- 2 표본 용기를 변기 받침대에 놓습니다.
- 3 Cologuard 키트를 사용해 표본을 채취합니다.
- 4 표본을 긁어낸 다음 표본 용기에 방부제를 넣습니다. 라벨 2장을 모두 작성하십시오.
- 5 선불 UPS® 라벨을 사용하여 채취 후 당일 또는 다음 날에 상자를 Exact Sciences Laboratories로 발송합니다. 1-844-870-8870으로 전화하여 비접촉 UPS 픽업을 예약하거나 Cologuard.com/UPS를 방문하십시오. 키트를 반환하라는 유용한 안내 전화를 받을 수도 있습니다.
- 6 키트가 실험실로 전달된 뒤 약 2주 후에 귀하가 키트를 주문한 의료 제공자가 결과를 알려드립니다. 결과가 어떤 의미를 나타내는지 자세히 알아보려면 Cologuard.com/UnderstandingResults를 방문하십시오.

연중무휴 지원 이용 가능

1-844-870-8870으로 전화하거나
다음 웹 사이트를 방문하여 당사와 채팅을
이용하세요 Cologuard.com

키트 내용물은 무엇이 있나요?



배송 박스



튜브



액상 방부제



표본 용기



환자 안내서



키트 반환 방법



받침대



표본 라벨

지시 사항 및 중요한 위험 정보

Cologuard는 대변에서 특정 DNA 마커와 혈액을 검출하여 평균적인 대장암의 위험을 가지고 있는 45세 이상의 성인을 검사하기 위한 것입니다. 선종이 있거나 염증성 장질환 및 특정 유전성 증후군이 있거나 대장암에 대한 개인 병력 또는 가족력이 있는 경우 사용하지 말아야 합니다. Cologuard는 고위험 환자의 대장 내시경 검사를 대신하지 않습니다. 45~49세 성인에서의 Cologuard 성능은 50세 이상 환자의 대규모 임상시험을 기반으로 추정된 것입니다.

Cologuard 검사 결과는 주의해서 해석해야 합니다. 양성 검사 결과가 암이 있다는 것을 확정하는 것은 아닙니다. 양성 검사 결과가 나온 환자는 대장 내시경 검사 진단을 받아야 합니다. 음성 검사 결과가 암이 없다는 것을 확정하는 것은 아닙니다. 음성 검사 결과가 나온 환자는 언제 다시 검사를 받아야 하는지 의사와 상의해야 합니다. 위양성 및 위음성 결과가 나타날 수 있습니다. 임상시험에서 암이 없는 사람 중 13%가 양성 결과(위양성)를 받았고 암이 있는 사람 중 8%가 음성 결과(위음성)를 받았습니다. Rx 전용.

참고 문헌:

1. Itzkowitz SH. Incremental advances in excremental cancer detection tests. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227. doi:10.1093/jnci/djp273
2. Siegel RL, Miller KD, Goding Sauer A, et al. Colorectal cancer statistics, 2020. *CA Cancer J Clin.* 2020;70(3):145-164. doi:10.3322/caac.21601
3. National Cancer Institute. Cancer stat facts: Colorectal cancer. Accessed July 16, 2021. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>
4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297. doi:10.1056/NEJMoa1311194
5. Cologuard® Physician Brochure. Madison, WI: Exact Sciences Corporation.

EXACT
SCIENCES

cologuard®
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard는 Exact Sciences Corporation의 등록 상표입니다.
기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

©2021 Exact Sciences Corporation. 당사가 모든 권리를 보유합니다.
US.CG.2859-5 August 2021