


Tầm soát ung thư ruột kết với Cologuard®

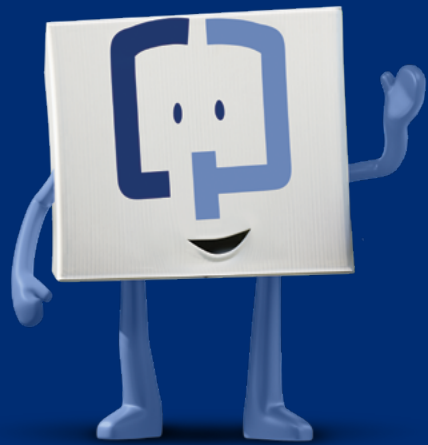

Chăm sóc bản thân bằng cách tầm soát ung thư đại trực tràng

Đây là dạng ung thư dễ phòng ngừa nhất nhưng cũng ít được phòng ngừa nhất¹

Bệnh này đang trở nên phổ biến ở những người <50 tuổi²

Khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh này có thể điều trị được ở 90% bệnh nhân^{3*}

Đó là lý do tại sao việc tầm soát kịp thời nên trở thành một phần trong khám sức khỏe thường xuyên



Cologuard được sử dụng để tầm soát ung thư cho người trưởng thành từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ bị ung thư đại trực tràng ở mức trung bình. Chỉ bán theo toa.

Vui lòng xem thông tin quan trọng về nguy cơ ở mặt sau của tập hướng dẫn.

*Dựa trên thời gian sống còn 5 năm.

Cologuard phát hiện được ung thư ruột kết ngay cả ở **giai đoạn** đầu^{4,5}

Cologuard là một phương án tầm soát không xâm lấn mà quý vị có thể thực hiện riêng tư tại nhà. Không cần chuẩn bị, xin nghỉ làm và thay đổi chế độ ăn hay dùng thuốc.



Cologuard phát hiện được **92%** các dạng ung thư nói chung⁴



Cologuard phát hiện được **94%** các dạng ung thư Giai Đoạn I & II⁵

Hiệu suất của Cologuard ở người trưởng thành từ 45-49 tuổi được ước tính dựa trên một nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn ở bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên. Trong nghiên cứu lâm sàng này, 13% số người không bị ung thư có kết quả dương tính (dương tính giả) và 8% số người bị ung thư có kết quả âm tính (âm tính giả).

Vui lòng tham khảo thông tin quan trọng về nguy cơ ở mặt sau của tập hướng dẫn.

\$0* là mức thanh toán của đa số bệnh nhân được bảo hiểm

Cologuard được Medicare và phần lớn các công ty bảo hiểm bao trả

Trên toàn quốc có hơn 94% bệnh nhân Cologuard không cần phải tự thanh toán chi phí cho dịch vụ tầm soát.*

*Exact Sciences ước tính dựa trên hóa đơn trước đây của bệnh nhân vào ngày 30 tháng Sáu năm 2021. Mức bảo hiểm thay đổi theo tiểu bang và khu vực. Các trường hợp ngoại lệ đối với bảo hiểm có thể được áp dụng; chỉ công ty bảo hiểm của quý vị mới có thể xác nhận Cologuard sẽ được bao trả cho quý vị như thế nào.

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm bằng cách truy cập Cologuard.com/insurance



Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể giúp quý vị liên lạc với công ty bảo hiểm của quý vị và đặt câu hỏi thích hợp. Hãy gọi chúng tôi theo số **1-844-870-8870**



Hãy xé mẫu giấy nhớ này ra để giúp quý vị gửi trả bộ dụng cụ Cologuard và dán tại nơi quý vị hay lưu giữ giấy nhớ — ví dụ như phòng tắm hoặc tủ lạnh.



Vui lòng gửi lại bộ dụng cụ muện nhất vào:

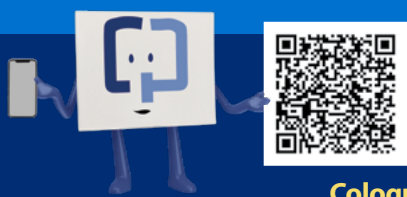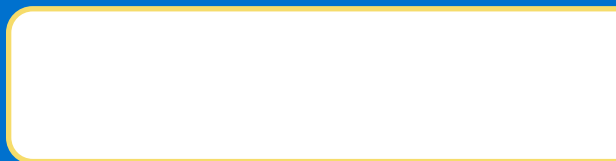


Mình rất dễ sử dụng!

Cologuard.com/use

Hãy sử dụng máy ảnh của điện thoại thông minh và quét mã QR để xem video Cách Sử Dụng.

Đừng quên gửi lại bộ dụng cụ Lấy Mẫu Cologuard của quý vị!

Cách sử dụng bộ dụng cụ Cologuard

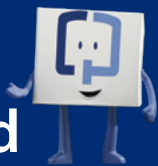

- 1 Khi quý vị đã nhận được bộ dụng cụ, hãy mở bao bì và xem Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân kèm theo.
- 2 Đặt hộp đựng mẫu của quý vị vào trong giá đỡ bền cầu.
- 3 Sử dụng bộ dụng cụ Cologuard để lấy mẫu.
- 4 Vết lấy mẫu, sau đó đổ chất bảo quản vào hộp đựng mẫu. Ngoài ra, hãy đảm bảo quý vị có điền thông tin vào đủ hai nhãn.
- 5 Sử dụng nhãn UPS® trả trước, gửi trả hộp lại cho Exact Sciences Laboratories vào cùng ngày hoặc ngày hôm sau sau khi lấy mẫu. Lên lịch nhận hàng không tiếp xúc với UPS bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 1-844-870-8870 hoặc truy cập Cologuard.com/UPS. Và quý vị có thể nhận được các cuộc gọi nhắc nhở hữu ích của chúng tôi về việc gửi lại bộ dụng cụ.
- 6 Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị yêu cầu xét nghiệm sẽ trả kết quả trong khoảng 2 tuần sau khi nhận được mẫu xét nghiệm tại phòng thí nghiệm. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về ý nghĩa của các kết quả bằng cách truy cập Cologuard.com/UnderstandingResults

Có dịch vụ hỗ trợ 24/7

Hãy gọi **1-844-870-8870** hoặc trao đổi với chúng tôi qua trang web Cologuard.com

Bên trong bộ dụng cụ có gì?



Hộp vận chuyển



Ống



Dung dịch bảo quản



Hộp đựng mẫu



Hướng Dẫn Cho Bệnh Nhân



Cách Gửi Lại Bộ Dụng Cụ của Quý Vị



Giá đỡ



Nhãn mẫu

Chỉ Định và Thông Tin Quan Trọng về Nguy Cơ

Cologuard được sử dụng để tầm soát cho người trưởng thành từ 45 tuổi trở lên, những người có nguy cơ bị ung thư đại trực tràng ở mức trung bình bằng cách phát hiện các chỉ thị DNA nhất định và máu trong phân. Không sử dụng nếu quý vị mắc u tuyến, viêm đường ruột và các hội chứng di truyền nhất định, hoặc tiền sử gia đình hay cá nhân mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Cologuard không thể thay thế cho phương pháp nội soi ruột kết ở những bệnh nhân nguy cơ cao. Hiệu suất của Cologuard ở người trưởng thành từ 45-49 tuổi được ước tính dựa trên một nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn ở bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên.

Cần cẩn trọng khi giải thích kết quả xét nghiệm Cologuard. Kết quả xét nghiệm dương tính không xác nhận sự hiện diện của ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được giới thiệu làm nội soi ruột kết chẩn đoán. Kết quả xét nghiệm âm tính không xác nhận bệnh nhân không bị ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nên thảo luận với bác sĩ của mình để biết khi nào họ cần được xét nghiệm lại. Có thể xảy ra trường hợp kết quả dương tính giả và âm tính giả. Trong một nghiên cứu lâm sàng, 13% số người không bị ung thư có kết quả dương tính (dương tính giả) và 8% số người bị ung thư có kết quả âm tính (âm tính giả). Chỉ bán theo toa.

NGUỒN THAM KHẢO:

1. Itzkowitz SH. Những tiến bộ đáng kể về xét nghiệm phát hiện ung thư qua phân. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227. doi:10.1093/jnci/djp273 2. Siegel RL, Miller KD, Goding Sauer A, et al. Số liệu thống kê về ung thư đại trực tràng, 2020. *CA Cancer J Clin.* 2020;70(3):145-164. doi:10.3322/caac.21601 3. Viện Ung Thư Quốc Gia. Dữ kiện thống kê về ung thư: Ung thư đại trực tràng. Truy cập vào ngày 16 tháng Bảy năm 2021. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html> 4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, và các nguồn khác. Xét nghiệm DNA trong phân đa mục đích để tầm soát ung thư đại trực tràng. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297. doi:10.1056/NEJMoa1311194 5. Cologuard® Tài Liệu Dành Cho Bác Sĩ. Madison, WI: Exact Sciences Corporation.

EXACT SCIENCES

cologuard®
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard là thương hiệu đã đăng ký của Exact Sciences Corporation.
Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

©2021 Exact Sciences Corporation. Bảo lưu mọi quyền. US.CG.2859-5 tháng Tám năm 2021